



MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

BUENAS PRÁCTICAS



1. **Lávate las manos** con jabón o solución hidroalcohólica



2. **Póntela de forma correcta**, debe cubrir la boca, nariz y barbilla



3. **No toques la parte delantera**, si lo haces lávate las manos



4. **No la pongas sobre la cabeza o bajo la barbilla**, para evitar contaminar el interior



5. **Retírala agarrando por los elásticos**, sin tocar la parte delantera



6. Si la transportas antes de lavarla, **métela en una bolsa transpirable**



7. **Lávate las manos** con jabón o solución hidroalcohólica después de quitártela



8. **Lávala según indicaciones del fabricante**, en su defecto, en lavadora a 60°



9. **Ponla a secar después del lavado**, por lo menos durante 2 horas